

Inserir o nome do Laboratório	Procedimento Operacional Padrão <b>TEMPO DE SANGRAMENTO</b>	Página 1 de 1 POPHEM 05 Revisão: 02
----------------------------------	--	---

<b>TEMPO DE SANGRAMENTO</b>
-----------------------------

**FUNDAMENTO**

Tempo de sangramento é uma prova funcional de hemostasia primária (plaquetas e pequenos vasos) que hoje em dia é raramente realizado.

**APLICAÇÃO CLÍNICA**

Avaliação da função hemostática global.

**AMOSTRA**

Não se aplica

**REAGENTE UTILIZADO**

Não se aplica

**EQUIPAMENTOS**

Lanceta descartável

Cronômetro

Papel de filtro

Material para assepsia

**PROCEDIMENTO**

Proceda a assepsia do lóbulo da orelha e faça uma incisão com a ajuda da lanceta descartável, cuja a ponta permita fazer um corte de 3mm de profundidade aproximadamente.

Quando aparecer a primeira gota de sangue, acionar o cronômetro e limpar a gota de sangue com o papel filtro sem tocar na incisão. Parar o cronômetro quando não aparecer nenhuma gota de sangue no papel. Este será o tempo de sangramento.

**LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS**

Quando a gota de sangue não aparecer no papel anotar o resultado em minutos. Sempre colocar um resultado mínimo de 1 minuto.

**VALORES DE REFERÊNCIA**

1 a 4 minutos

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Wallach, J. Wilach Interpretação de exames laboratoriais. 9ed. – RIO DE JANEIRO: Guanabara Koogan,2013.

	Nome	Assinatura	Data
Elaborado por:			_/_/___
Aprovado por:			_/_/___
Implantado por:			_/_/___
Substitui POP:			
Revisado por:	Lilian Mayumi Tanida		_15/_03/_23_
Revisado por:			_/_/___
Revisado por:			_/_/___
Desativado por:			_/_/___
Razão:			